

ANEXO I: FOLLETO INFORMATIVO

VRIO PACK, S.L.

Avda. Benigno Rivera
27003 Lugo España

ARI

Este EPI de Categoría III ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, EN 149:2001+A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Media máscara filtrante para proteger contra partículas. Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad con el certificado nº 21/4623/00/0161 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoy, España, Organismo Notificado 0161

Listado de materiales de cada componente del EPI.

Media máscara filtrante de un solo uso compuesto por cuatro capas de tejido no tejido, barra de polietileno plástico de 5mm de sección para ajuste a la nariz, y arneses de 4-6mm de sección para las orejas. La primera capa de tejido no tejido o capa exterior con densidad 50gr/m², la segunda capa de tejido no tejido meltblown de 40 gr/m², la tercera capa de algodón de 50 gr/m², y la cuarta capa y última, de material no tejido de 30 gr/m², todas ellas de 260 mm de ancho.

Instrucciones de almacenamiento:

Mantenga la mascarilla alejada de la exposición innecesaria a la luz solar, en lugares secos y protegida contra agentes agresivos

Instrucciones de uso:**Instrucciones de colocación**

• Coloque el dorso de la mascarilla hacia arriba. Use la lengüeta del panel inferior, para desplegar la mascarilla y separar el borde superior del inferior, hasta obtener una forma de taza. Doble ligeramente el centro del clip nasal.
• Asegúrese que ambos bordes están totalmente desplegados.

- Colocar el dorso de la máscara hacia arriba. Usar la lengüeta del panel inferior para desplegar la mascarilla y separar el borde superior del inferior, hasta obtener una forma de taza. Doblar ligeramente el centro del clip nasal.
- Asegurar que ambos bordes están totalmente desplegados.
- Sostener la mascarilla contra la barbilla para cubrir la nariz y la boca.
- Pasar las bandas elásticas por detrás de las orejas y ajustarlas.
- Con ambas manos ajustar el clip nasal. Colocar los dedos en el medio de éste y presionarlo hacia adentro hasta encajarlo en el puente de la nariz.
- Cubrir la mascarilla con las manos y exhalar fuerte. Si se escapa aire por el clip de la nariz, ajustarlo de nuevo. Si es por el borde, recolocar este.
- Es poco probable que se cumplan los requisitos de fugas si el vello facial pasa por debajo del sello facial.
- Evitar utilizar con barba u otro vello facial que dificulte el contacto entre la cara y la máscara, impidiendo un buen sellado

Instrucciones de limpieza y desinfección:

-No aplicable por ser una mascarilla de un solo uso.

Instrucciones de revisión:

- Compruebe que la máscara está en perfecto estado, no utilizar la máscara si está en malas condiciones.
- La máscara debe utilizarse antes de su fecha de caducidad indicada en el embalaje como año y mes con el símbolo . Antes de utilizar la máscara, verificar que está dentro de su vida útil.
- Utilizar la máscara durante toda la exposición, y sustituirla cuando sea necesario. No seguir todas las instrucciones de uso y/o no utilizar correctamente el producto durante toda la exposición al riesgo puede afectar a la salud del usuario
- No se utilizará durante más de un turno de trabajo
- Deseche y reemplace la máscara si se daña o aumenta la resistencia a la respiración
- Nunca altere, modifique o repare la máscara
- No utilizar en atmósferas con deficiencia de oxígeno, que contengan menos del 19,5% de oxígeno
- No utilizar como protección respiratoria frente a contaminantes atmosféricos/concentraciones desconocidas o inmediatamente peligrosos para la salud o la vida.
- No protege frente a gases/vapores.
- La máscara no es resistente al fuego y no debe utilizarse en áreas de fuego abiertas.
- Máscara no válida en atmósferas explosivas, no utilizar zonas de riesgo de explosión.
- Este producto no contiene componentes fabricados con látex de caucho natural.
- El usuario debe conocer el uso y manejo de la máscara.
- Desechar en el contenedor de restos para que puedan ser tratados y no supongan un grave problema ambiental. Los productos contaminados deben desecharse atendiendo a la legislación local para desechos peligrosos.

Embalaje/Empaquetado:

- En caja de 10 unidades. 20 cajas en el interior de caja de cartón (200 uds).
- 5 unidades envueltas en film plástico. 50 paquetes en caja de cartón (250 uds).

Embalaje adecuado para el transporte:

Transporte en caja de cartón.

Campos de uso aplicables a este EPI:

Este EPI está destinado a la protección respiratoria contra partículas, excepto partículas para situaciones de escape.

Rendimiento o prestaciones y niveles o clases de protección que ofrecen los EPI destinados a la protección ocular y facial:

Máxima penetración del material del filtro (Aerosoles de Parafina y Cloruro sódico):

Clasificación	95 l/min % Max.
FFP1	20
FFP2	6
FFP3	1

Resistencia a la respiración

Máxima Resistencia permitida (mbar)

Clasificación	Máxima Resistencia permitida (mbar)		
	Inhalación 30l/min	Inhalación 95l/min	Exhalación 160l/min
FFP1	0,6	2,1	3,0
FFP2	0,7	2,4	3,0
FFP3	1,0	3,0	3,0

Fuga hacia el interior

Al menos 46 de los 50 resultados de los ejercicios individuales para la fuga hacia el interior total (esto es, 10 sujetos x 5 ejercicios) no deben ser superiores al:	25% para FFP1 11% para FFP2 5% para FFP3
Adicionalmente, al menos, 8 de las 10 medias aritméticas de los portadores individuales para la fuga hacia el interior total no deben ser superiores al:	22% for FFP1 8% for FFP2 2% for FFP3

Reutilizable

"NR". la media máscara del filtro de partículas no debe utilizarse para más de un turno de trabajo.

Obstrucción (ENSAYO DE DOLOMITA):

D (Marcado en el caso en que proceda): No evaluado

Marcado y rendimiento registrado en los ensayos técnicos aplicable a este EPI:

Marcado de mascarilla:

EN 149:2001+A1:2009

VP

ARI

**Limitaciones de uso**

- No lo use contra gases
- El usuario debe conocer el uso y el manejo de la máscara.
- No utilice en zonas de riesgo de explosión.
- Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos.
- La media máscara filtrante no debe usarse más de un turno de trabajo cuando está marcada como "NR", por lo que debe desecharse.

Instrucciones de montaje:

No aplica.

Accesorios apropiados y piezas de repuesto de este EPI:

No aplica.

Advertencias:

- Verificar antes de usar el montaje o ajuste de la media máscara filtrante.
- Es poco probable que se cumplan los requisitos de estanqueidad si, debajo del sello facial, pasan los vellos faciales;
- Se debe considerar la calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno);
- No permitido el uso del equipo en atmósferas explosivas
- La mascarilla no requiere de mantenimiento por ser un EPI de un solo uso

Expiración de vida útil

Ver el embalaje

Año de fabricación: 2021

Acceso a la Declaración de la Conformidad:

Web: Declaración de conformidad en www.vpmascarillas.com

EXPLICACIONES DE LOS PICTOGRAMAS:

Fecha de caducidad del EPI (año/mes)
aaaa/mm



Desechar después de su uso



Producto de un solo uso



No exponer a la humedad



No exponer a la luz directa del sol



Producto no estéril



Rango de temperatura de almacenamiento



Máxima humedad relativa de almacenamiento
80%HR



Ver información proporcionada por el fabricante



Fabricante



Fecha de fabricación aaaa/mm



LOT Número de lote